

ప్రాంతం
ఫ్రెంచ్ లైప్సిచర్
Telephone

011 2669192, 011 2675011
011 2698507, 011 2694033
011 2675449, 011 2675280

పోస్ట్
ఫెక్స్
Fax

011 2693866
011 2693869
011 2692913

ఇమెయిల్ తాపా
సింగస్టుషన్ రూక్వారి
e-mail

) postmaster@health.gov.lk

అధికారి
ఇంణయిత్తనాం
website

) www.health.gov.lk



సువాసిరిపాయ
కవచిరిపాయ

SUWASIRIPAYA

ఉండి ఉండి
ఎన్నతు ఇల
My No.

ఉండి ఉండి
ఉండతు ఇల
Your No.

రైయ
తికథి
Date

MRI/DIR/Common/01/2018

28.11.2018

సౌభాగ్య, పోతులు జన దేశియ వెల్దు అమాతఖండయ
కుకాతార, పోచణై మర్ఱుమ సుతోచ వైతంతియ అమెషస్
Ministry of Health, Nutrition & Indigenous Medicine

పొతు కుర్రహితకై ఎన్ : 01-49/2018

మాకానా సుతోచ చేవెవకసి పణిపాంచరకసి, ప్రాంతియ కుకాతార చేవెవకసి పణిపాంచరకసి,
పోతునా వైతంతియశాఖలకసి పణిపాంచరకసి, విశేష నీటి పణిపాంచరకసి,
మత్తియ అమెషసిన క్రూరులు సకల వైతంతియశాఖలకసి మర్ఱుమ తాపన తలువర్కసి

వైతంతియ ఆరాయిచ్చి నిర్మివనమ (MRI) కొర్మమ్
ప్రశోతనైకానుక్కాక మాత్రికలు ఉపపాటత్తలు చంమంతమానా
అధివ్యాఖ్యలకులు

వైతంతియ ఆరాయిచ్చి నిర్మివనమ వైతంతియ ఆరాయిచ్చికసిల సుప్రాపుతుటన వేఱు ఎంత
ఆయవుకుటాంకలిలుమ వ్యుంకారత అతి విశేష నోయ కన్నాపుటిప్ప వశతికలు వ్యుంకివురుమ నూట్టినిర్తాన
తేసియ నిర్మివనమ ఆకుమ. అణుమయిల MRI యిల పలవేఱు పుతియ నోయ కన్నాపుటిప్ప నృపంకసి
అర్మిమకప్పాతుతప్పాటులాతుటన ఆయవుకుట ప్రివికలిన పురుసివియల విపరంకసింపాది కటంత సిల
అణుంకలిల మరుత్తువ ప్రశోతనైకాలిన ఎంణికైక కిటత్తట ఇర్టిపాక్కప్పాటులాతాక తెరియ
వరుక్కిఱు.

వైతంతియ ఆరాయిచ్చి నిర్మివనమల అతికరికుమ ఇంత వెలలశకుమాక్కేర్ప ప్రశోతనైకాన
మాత్రికలు తిఱమయాక కైయాంతల మర్ఱుమ ప్రశోతనై చెయవతర్కుమ నేరత్తిర్కు అధికకైకలు
వెసియిటువతర్కుమ పినవురుమ తకవలకునుక్కినాంక చెయ్యప్రాపుతు ముక్కియమాకుమ. (పినవిణిప్ప 1)

ప్రాంతియ ఆరాయిచ్చి

ప్రాంతియ సుతోచ చేవెవకసి పణిపాంచ

Dr. Anil Jasinghe
Director General of Health Services
Ministry of Health, Nutrition & Indigenous Medicine,
"Suwasiripaya"
385, Rev. Baddegama Wimalawansa Thero Mawatha,
Colombo 10.

பின்னினைப்படி 1

வைத்திய ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (MRI) கொழும்பு

பரிசோதனைகளுக்காக மாதிரிகளை ஒப்படைத்தல் சம்மந்தமான அறிவுறுத்தல்கள்

1. வைத்தியசாலைகளிலிருந்து அனுப்பப்படும் அனைத்து மாதிரிகளும் வைத்திய ஆய்வுகூடத்தினுடோகவே மிகவும் அவசர நிலைமையை தவிர) வைத்திய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு அனுப்பிவைக்கப்படல் வேண்டும்.

2. வைத்திய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு மாதிரிகளை அனுப்பும்போது ஆய்வுகூட ஊழியர்கள் அறிவுறுத்தல்களில் முக்கிய கவனம் செலுத்தவும்.

a) ஒரு பரிசோதனைக்காக மாதிரியோன்றை அனுப்புவதற்கு முன்பு வைத்திய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் குறிப்பிட்ட அந்த பரிசோதனை நடாத்தப்படுகின்றதா என்பதை ஆராய் வேண்டும் இதற்காக தொலைபேசி அழைப்போன்றை மேற்கொள்வதன் மூலமாகவோ அல்லது இணையத்தளத்தைத் தொடர்புகொள்வதன் மூலமாகவோ அறிந்துக்கொள்ள முடியும்.

b) குறித்த பரிசோதனைக்கேற்ப பொருத்தமான மாதிரி சேகரிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை சரிபார்க்கவும் அவ்வாறில்லாவிடல் வாட்டுடன் தொடர்பு கொள்வதன் மூலம் பொருத்தமான மாதிரியை பெற்றுக்கொள்ளவும் (உ+ம்) இரத்தம், சிறுநீர், இழையமாதிரி.)

c) குறித்த மாதிரி பொருத்தமான மாதிரிகொள்கலனில் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை சரிபார்க்கவும் பென்சிலின் போத்தல்களில் மாதிரிகளை அனுப்புவதை தவிர்க்கவும் ஒரு முறை பாவிக்கக்கூடிய (Disposable) பிளாஸ்டிக் குழாய்கள் போத்தல்களை பாவிக்கவும் அவ்வாறில்லாவிடல் வாட்டுக்கு அறிவிப்பதன் மூலம் பொருத்தமான மாதிரிகொள்கலனில் மீண்டும் அம்மாதிரியை சேகரிக்கச்செய்யவும் அனுப்புதல் (உ +ம் acid washed bottles for ca ²⁺) தயவு செய்து MRI இன் வைரஸ் பிரிவினால் இத்துடன் இணைக்கப்பட்ட தகவல் குறிப்பை வாசிக்கவும்.

d) சேகரிக்கப்பட்டு சிலநாட்கள் தாமதமான மாதிரிகளை அனுப்புவதைத் தவிர்க்கும் (புதிதாக கேரக்கப்பட மாதிரிகளின் பரிசோதனை முடிவுகள் மட்டுமே துல்லியமானவை)

e) மாதிரிகளை அனுப்பும்போது குளிர்நிலையில்(cool condition) அனுப்பவேண்டிய மாதிரிகளை சரியாக பளிக்கட்டியுடன் அவ்வாறே அனுப்புவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கவும் (உ+ம்) PCR பரிசோதனைக்காக கிடைக்கப்பெறும் மாதிரிகளை அவ்வாறே அனுப்புவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கவும் (உ+ம்) பரிசோதனைக்காக கிடைக்கப்பெறும் மாதிரிகளை செல்சியஸ் 2-8(°C) இடைப்பட்ட வெப்பநிலையில் பொதிசெய்யப்பட்டு அனுப்பப்படல் வேண்டும்.

f) சட்டவைத்திய அதிகாரி ஒருவரினுடோக அனுப்பப்படும் மாதிரிகள் அனைத்தும் கட்டாயமாக கடித உறையிலுள் ரப்பர் முத்திறையிடப்பட்டு அனுப்பப்படல் வேண்டும் மாதிரிகள் வெளியில் சிந்தாத் வகையில் அனுப்புவது அவசியமாகும் முடியுமானவரை மாதிரிகளை பழுதடையாத நிலையில் (Decomposed) அனுப்புவதற்கு அவசியமாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் (உ+ம்) serum மூலம் மேற்கெள்ளப்படும் பரிசோதனைகளுக்காக whole blood நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் (உ+ம்) serum மூலம் மேற்கெள்ளப்படும் பரிசோதனைகளுக்காக அனுப்பப்படும் ந்தூப் பதிலாக பிரித்தெடுக்கப்பட்டு அனுப்பப்பட முடியும் சட்டவைத்திய நடவடிக்கைகளுக்காக அனுப்பப்படும் மாதிரிகள் முடியுமானவரை விரைவாக அனுப்பப்படின் மட்டுமே குறித்த பரிசோதனையை தாமதமின்றி மேற்கொள்ள முடியும்.

g) வைத்திய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் வெவ்வேறு ஆய்வுகூடப் பிரிவுகளில் நடைபெறும் வெவ்வேறு பரிசோதனைகளுக்காக மாதிரிகளையும் சரியாக நிரப்பப்பட்ட ஆய்வுகூட வேண்டுகோள் படிங்களையும் பரிசோதனைகளுக்காக மாதிரிகளையை சரியாக நிரப்பப்பட்ட ஆய்வுகூட வேண்டுகோள் படிங்களையும் வெவ்வேறாக அனுப்புதல் கவனத்தில் கொள்ளப்படல் வேண்டும் உ +ம் பக்ரீயாயியல் பிரிவிலும் வைரஸ்வியல் பிரிவிலும் நடைபெறும் வெவ்வேறு பரிசோதனைகளுக்காக ஒரேயொரு மாதிரியை அனுப்புதல் தவிர்க்கப்படல் வேண்டும் இதற்கு பதிலாக இரண்டு மாதிரிகள் வெவ்வேறாக அனுப்பப்படல் அவசியமாகும்.

h) ஆய்வுகூட வேண்டுகோள் படிங்கள் ஒழுங்காகவும் முழுமையாகவும் நிரப்பட்டுள்ளதா என்பதை அறிந்பபடுத்திக்கொள்ளல் வேண்டும் அவ்வாறில்லாவிடல் MRI க்கு அனுப்புவதற்கு முதல் வாட்டுக்கு அனுப்பி

படிவத்தை பரிபூரணப்படுத்திப் பெற்றுக்கொள்ளல் வேண்டும், விசேட பரிசோதனைகளுக்காக குறிப்பிட்ட வைத்திய நிபுணரின் கையொப்பமும் ரப்பர் முத்திரையும் இடப்படல் அவசியமாகும்.

i) வைத்தியசாலையின் பெயர் ஆய்வுகூட வேண்டுகோள் படிவத்தில் தெளிவாக குறிப்பிடப்படல் வேண்டும் கருக்கமாக பெயரிடுவதைத் தவிர்க்கவும் உம் Teaching hospital – karapitiya வகுகு THK எனப்பெயரிடல் இதற்கு பதிலாக வைத்திய சாலையின் ரப்பர் முத்திரை பதிக்கப்படல் வேண்டும்

j) மாதிரி பெயரிடப்படும்போது கீழ் காட்டப்பட்டுள்ள முறைப்படி பெயரிடவும் பெயரிடப்பட்டு ஒட்டப்பட்ட சீட்டு களராமல் இருப்பதை உறுதிசெய்யவும்.

Blood for dengue antibody	
Name	
BHT	
Ward	
Hospital	

k) அனைத்து மாதிரிகளுக்கும் ஆய்வுகூட தொடரிலக்கமொன்று தெளிவாக இடப்படல் வேண்டும் அதெ இலக்கத்தையே ஆய்வுகூட வேண்டுகோள் படிவத்திலும் இடவும் இவ்வாறு செய்யப்படுவதும் MRI யில் மாதிரியிடப்படக்குமிடத்தில்(Counter) ஏற்படும் தாமதத்தைத் தவிர்த்துக்கொள்ள முடியும்

l) அனைத்து மாதிரிகளும் தொடரிலக்கவரிசைப்படி புத்தகம் ஒன்றில் (delivery book) எழுதப்பட்டு அனுப்பப்படல் வேண்டும்.

m) மாதிரி அனுப்பப்படும்போது அவை வெளியில் சிந்துதல் தவிர்க்கப்படும் வகையில் மாதிரிக்கொள்கலன்கள் அமைந்திருத்தல் வேண்டும் .

3. அனைத்து ஆய்வுகூட அறிக்கைகளும் சம்பந்தப்பட்ட வைத்திய சாலைகளின் ஆய்வுகூடங்களுக்கே அனுப்பிவைக்கப்படும் சோதனை அறிக்கைகளை இல் நேரடியாக பெற்றுக்கொள்ள வரும் வைத்தியசாலை ஊழியர்கள் வசதியாக ஒரு கருமப்படம் மாதிரிகளை பெற்றுகொள்ளும் கருமபீத்திற்கு அருகில் வேறாக ஒரு இடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது (இதற்காக மாதிரி ஒப்படைக்குமிடத்திற்கு அருகில் வேறாக ஒரு இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது வைத்தியசாலை ஆய்வுகூடங்களில் இந்த பரிசோதனை அறிக்கைகள் பெறப்படவுடன் புத்தகம் ஒன்றில் பதிவுசெய்யப்பட்டு அவை குறித்த வாட்டுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படல் வேண்டும் அத்துடன் வாட்டில் அறிக்கைகள் பெறப்பட்டாக கையொப்பம் பெற்றுக்கொள்ளப்படல் வேண்டும்.

4. சிறிய வைத்தியசாலைகள் வழக்கமான சோதனைகள் விசேடமற்ற சோதனைகள் சம்மந்தமாக அருகில் உள்ள பெரிய வைத்தியசாலைகளின் சேவைகளை நாடலாம் (ஆம்) DGH, நுவரெலுய ,DHS பஞ்சாரவளை அப்புத்தனையில் இருந்து வரும் சோதனை கூறுகளைPGH மூதனைக்கு அனுப்பலாம் *

5. விசேட மாதிரி சேகரிக்கும் போதல்கள் வைத்திய ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தால் வழங்கப்பதல் வாரநாட்களில் மு. ப 9. 00 மணி தொடக்கம் பி. ப 3. 00 மணி வரையிலும் சனிக்கிழமைகளில் மு. ப 9. 00 மணி முதல் மு. ப 11.30 மணி வரையிலும் மட்டுமே வழங்கப்படும்

மேலதிக தகவல்களுக்காக சாதாரண வேலை நேரங்களில் குறிப்பிட்ட ஆய்வுகூடப்பிரிவையும் ஏனைய நேரங்களில் தங்கியிருக்கும் வைத்திய ஆய்வுகூட தொழில்நுட்பவியலாளரையும் (RMLT) தொடர்பு கொள்ளலும் 011 - 2693532 011- 2693527 அவசர அழைப்பிற்கு - 0112693536

குறிப்பு :- தயவு செய்து இந்த தகவல்களை உங்கள் வைத்தியசாலையின் குறித்த ஊழியர்கள் அனைவரினதும் கவனத்திற்கு கொண்டுவரவும்.

இணையதளம் :- www.mri.gov.lk